



MEDIN

DOČASNÁ NÁHRADA ŠLACHY

MEDIN
ORTHOPAEDICS

MEDIN DOČASNÁ NÁHRADA ŠLACHY

Dočasný silikonový šlachový implantát vyráběný společností Medin Orthopaedics a.s. nahrazuje dříve v Čechách používaný výrobek firmy Rubena.

Technický popis dočasného šlachového implantátu:

Dočasný šlachový implantát silikonový má válcový tvar s hladkým povrchem. Implantáty jsou dodávány v průměrech 3, 4, 5 a 6 mm, v délkách 120 a 180 mm a na zvláštní objednávku jsou dodávány délky 220 mm.

Materiál, ze kterého jsou dočasné šlachové implantáty vyrobeny, je silikon firmy NUSIL označovaný jako MED 4550.

Tento materiál je určen pro dlouhodobou implantaci uvnitř organismu člověka, která může přesahovat dobu 30 dnů. Své mechanické vlastnosti si zachovává po celou dobu implantace.

Výrobce dodává dočasné šlachové implantáty nesterilní, přičemž tento stav je výrazně označen na obalu. Sterilizaci či případnou resterilizaci lze provést běžně dostupnými metodami jako např. parní sterilizací, horkovzdušnou sterilizací, atd. Počet sterilizačních cyklů není omezen. Bližší informace naleznete v příbalové dokumentaci.

Použití:

Implantát je určen k dočasné náhradě šlachy flexoru ruky při dodržení těchto podmínek:

- pasivně plný rozsah pohybu v MCP i PIP kloubu
- kvalitní kožní kryt a fyziologické prokrvení prstu
- není možné provést přímo suturu flexoru či rekonstruovat flexor jiným jednoetapovým postupem (transpozice flexoru, šlachový štěp)

Kontraindikace:

Z hlediska lokálního nálezu:

- nedostačující pasivní flexe prstu
- nekvalitní kožní kryt, případně těžké jizevnaté změny kožního krytu v oblasti implantace
- defekt měkkých tkání v oblasti implantace
- obleněné prokrvení prstu, které může další operace vážně ohrozit

Z hlediska celkového stavu :

- probíhající celkové infekční onemocnění
- nesnášenlivost pacienta na silikon
- nespolupracující pacient

Výrobce: MEDIN Orthopaedics, a.s., Jinonická 329, 150 07 Praha 5 - Jinonice, Tel.: 251 043 540, Fax: 251 042 121, e-mail: ortho@medin.cz

Distributor:

MEDIN, a.s.

Vlachovická 619

592 31 Nové Město na Moravě

Czech Republic

IČO 43378030

DIČ CZ43378030

prodej

Česká republika

Tel.: **566 684 327-8**

Fax: **566 684 384**

e-mail: **prodej@medin.cz**

www.medin.cz

prodej

Slovenská republika

Tel.: **00420 566 684 332**

Fax: **00420 566 684 385**

e-mail: **export@medin.cz**

Distributor:

Endoimplant spol. s r.o.

Na Pískách 13

160 00 Praha 6

Czech Republic

IČO 17049962

DIČ CZ17049962

prodej

Česká republika

Tel.: **233 326 500**

Fax: **233 321 681**

e-mail: **centrum@endoimplant.cz**

www.endoimplant.cz